

PHILIPS

RESPIRONICS

Dream Wear

Burun altı
Maskesi


Boyut Kılavuzu

Talimatlar:

- 1 Baskı aldığınız boyutlandırma kılavuzunu kontrol etmek için yandaki kontrol şablonunu kullanabilirsiniz.
- 2 Bu sayfanın alt kısmını kesikli çizgiye katlayın.
- 3 Montaj göstergesini etrafındaki noktalı çizgi boyunca kesin
- 4 Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi montaj göstergesini burnunuza yerleştirin.
- 5 Burun deliklerinin dış kenarının ve burnunuzun ucunun montaj mastarıyla temas ettiği uygun boyutu belirleyin (S - Küçük, M - Orta, MW - Orta geniş veya L - Büyük)


İpucu: En iyi performans için burnunuza uyan en küçük yastıkları kullanın.

Philips Respironics, uygun bir boyutlandırma ve uyum sağlamak için daima bir hekimle veya kayıtlı Uyku Terapistinizle maskesini takmanızı önerir.

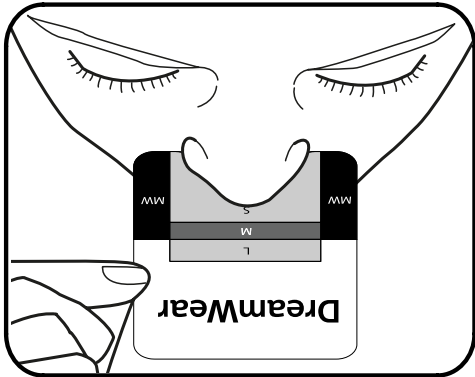

Noktalardan katlayıp kesin

Baskı kontrol şablonu

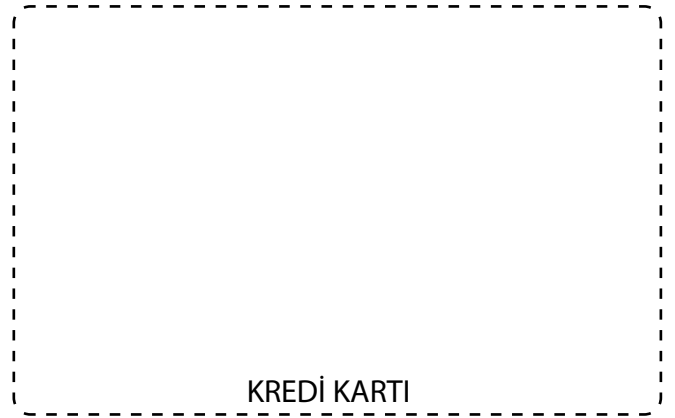

Montaj Göstergesi

Noktalar boyunca kesin

