
ResMed

AirFit™ N30i

AirFit™ P30i

Kullanım Klavuzu

Türkçe




AirFit™ N30i
AirFit™ P30i

Kullanım Klavuzu



Nasal cradle
mask

TÜRKÇE

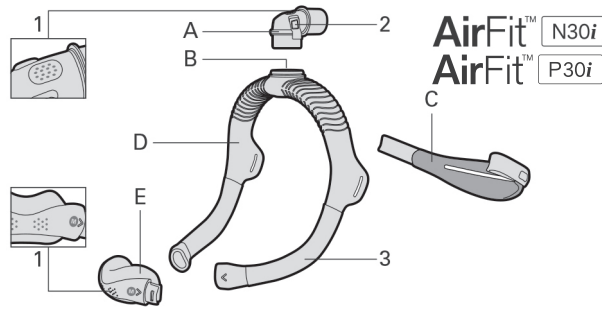

A	Dirsek	E	Silikon
B	Dirsek Halkası	1	Tahliye (Silikon&Dirsek)
C	Başlık	2	Yan Düğmeler
D	Çerçeve	3	Kol

Kullanım amacı

AirFit P30i ve N30i maskesinin, CPAP veya iki seviyeli terapi gibi non-invaziv pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisi için reçete edilen 30 kg'dan ağır hastalar tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Maske evde tek hasta tekrar kullanım için ve hastanede / kurumsal ortamda çok hasta tekrar kullanım için tasarlanmıştır.


Lütfen kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun.

Maskenizi kullanmadan önce

Tüm ambalajı çıkarın ve her maske bileşenini görünür bozulma açısından inceleyin.

Doğru boyuttaki silikonun ve çerçevenin seçilmesine yardımcı olmak için uygulama şablonunu kullanın.

Maskenin Yerleşimi

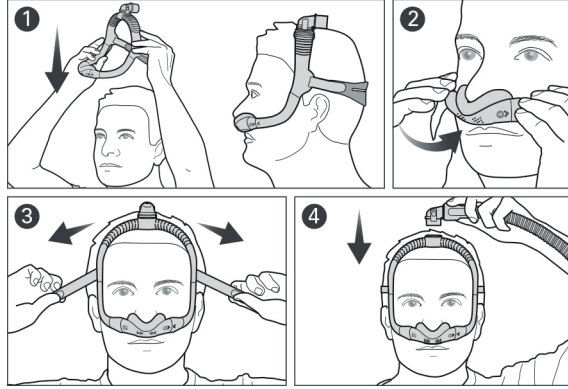


1. Çerçeveyi ve başlığını, dirsek üstte ve başlık başınızın arkasında durana kadar kafanızın üzerinden geçirin.
2. Silikonu burnunuzun altına yerleştirin.
3. Yastığı burnunuzun altına rahatça oturana kadar başlığı sıkın veya gevşetin.
4. Dirsek üzerindeki yan düğmelerini sıkın ve çerçeveden çıkarın. Cihazınızın hortumunu dirseğe bağlayın, ardından çerçeveye tekrar takın.

Maskenizin Ayarlanması

- Maskeyi kullanırken, hava yastığı ve dirseğindeki havalandırma deliklerinden dışarı çıkacaktır. Hava silikonun yan veya üstünden sızıyorsa, sızdırmazlığı iyileştirmek için maske bağlantı parçasını ayarlayın.
- Maskenin rahat hissettirmesine kadar çerçevenin üst kısmını başınızın üzerinde ileri veya geriye doğru konumlandırabilirsiniz.

Temizlemek için maskeniz sökümü

Maskeniz cihaza bağlıysa, cihaz hortumunu maske dirseğinden ayırın.

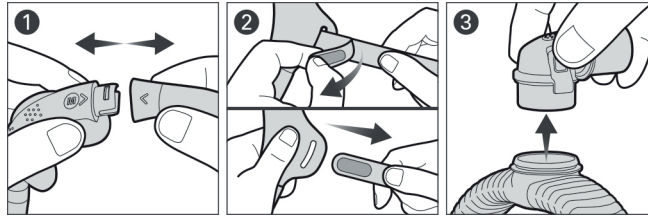

1. Silikonu çerçeveden ayırın
2. Bandları gevşetin ve çerçeveden ayırın
3. Dirseğin yan düğmelerine basarak dirseği çerçeveden ayırın

Maskenizin temizliği

Her Kullanım Sonrası: Silikon

Haftalık: Başlık, çerçeve ve dirsek

1. Bileşenleri ılık suda hafif bir sıvı deterjanla ıslatın. Temizlerken hava kabarcığı olmadığından emin olun.
2. Parçaları yumuşak kıllı bir fırça ile elde yıkayın. Hava çıkış deliklerine dikkat edin
3. Bileşenleri akan suyun altında iyice durulayın
4. Fazla suyu temizlemek için başlığı temiz bir havlu ile sıkın. Bileşenleri doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan kurumaya bırakın.

Maske bileşenleri gözle görülür şekilde temizlenmiyorsa temizlik adımlarını tekrarlayın.

Maskenizin Tekrar Takılması

1. Dirseği çerçevenin üst kısmına takınız. Klik sesi gelicektir.
2. Başlığı çerçeveden geçirin ve geriye doğru sıkarak sabitleyiniz.
3. Silikonu çerçevenin son noktası takınız. Silikon ve çerçeve üzerinde bulunan okların denk geldiğinden emin olunuz.

Not: Eğer dirsek ayrılırsa, tekrar çerçeve üstündeki yerine takınız.

UYARI

- Maske Yaşam destek ventilatörü hastaları için uygun değildir.
- Tedavinin güvelliği ve kalitesinin etkilenmesinden kaçınmak için, maske çıkışları geri solumayı önlemek için açık olmalıdır. Sıklıkla hava çıkışlarının temiz, hasarsız ve tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
- Maskeyi kendi başlarına çıkartamayan hastalar, maskeyi yetkili gözetim altında kullanılmalıdır. Maske aspirasyona eğilimli olanlar için uygun olmayabilir
- Sağlığını etkileyebilecek bakteri oluşumunu önlemek ve maske kalitenizi korumak için maskenizi sıklıkla temizleyiniz
- Ürün denetimi için görsel kriterler: Bir maske bileşeninde gözle görülür bir bozulma varsa (çatlama, delme, yırtılma vb.), Bileşen atılmalı ve değiştirilmelidir.
- Sadece uyumlu CPAP ve Bi-Level cihazlar ile kullanın. Maskenin teknik özellikleri, CPAP veya Bi-Level cihazla uyumlu olduklarını kontrol etmek için klinisyeninize veya solunum terapistinize verilir. Uyumsuz cihaz ile kullanımı maske güvenliğini ve etkinliğini etkileyebilir.
- Herhangi bir yan etki oluşumunda maskeyi kullanmayı bırakın ve doktorunuza veya uyku terapistinize danışın
- N30i serisi Burun CPAP maskelerinin, maske / hortum hava yolunda bulunan nebulizatör ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

DİKKAT

- Maskeyi kullanmadan önce tüm ambalajı çıkarın
- Maske kullanmak dış, dış eti veya çene ağrılarına neden olabilir veya mevcut dış rahatsızlığımı şiddetlendirebilir. Semptomlar ortaya çıkarsa, doktorunuza veya dişçinize danışın.
- Maskeyi takarken, silikonun etrafındaki cilt kızarıklıklarına ya da yaralara neden olabileceğinden, başlığı fazla sıkmayın.
- Cihaz açılmadığı sürece maske kullanılmamalıdır. Maske takıldıktan sonra geri soluma riskini azaltmak için cihazın hava üflediğinden emin olun.
- Tüm maskelerde olduğu gibi, düşük basınçta bazı geri soluma olabilir.
- Her zaman temizlik talimatlarını takip edin. Bazı temizlik ürünleri, maskeye, parçalarına ve işlevlerine zarar verebilir veya zararlı artık buharı bırakabilir. Maskenizi temizlemek için çamaşır ve/veya bulaşık makinası kullanmayınız
- Başlıklar ısıya karşı duyarlı olduğundan ve zarar görebileceğinden dolayı ütülemeyiniz

Teknik Özellikler


Maske Ayar Seçenekleri

AirSense, AirCurve ve S9 için: "Yastıklar" seçin.

Uyumlu Cihazlar

Bu maske için uyumlu cihazların tam listesi için [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks) adresindeki MASke/Cihaz uyumluluk listesine bakınız

Basınç-Akım Eğrisi:

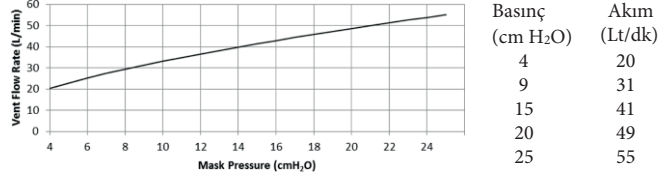

Tedavi Basıncı: 4 to 25 cm H₂O

Direnç

Ölçülen basınç (nominal) 50 L / dak'da düşer: 0,4 cm H₂O

Ölçülen basınç (nominal) 100 L / dak'da düşer: 1,7 cm H₂O

Ses: ISO4871:1996 ve ISO3744:2010'e uygun olarak bildirilen çift sayımlı gürültü emisyon değerleri. Maskenin 1 m'lik bir mesafede, 3 dBA'lık belirsizliğe sahip A-ağırlıklı ses gücü seviyesi 24 dBA ve A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi 17dBA gösterilir.

Çevre Koşulları:

Çalışma Sıcaklığı: 5°C to 40°C

Çalışma Nemliliği: 15% to 95% yoğuşmasız

Taşıma ve Saklama sıcaklığı: -20°C - +60°C

Taşıma ve Saklama Nemliliği: 95%'e kadar yoğuşmasız

Hizmet ömrü

AirFit P30i ve N30i maske sisteminin servis ömrü, maskenin kullanıldığı veya saklandığı kullanım, bakım ve çevre koşullarının yoğunluğuna bağlıdır. Bu kılavuzun 'Uyarı' bölümünde, maske sistemi ve bileşenleri doğası gereği modüler olduğundan, kullanıcının düzenli aralıklarla bakımını ve kontrolünü yapması ve maske sistemini veya gerekli gördüğü hallerde ya da 'Ürün inceleme için görsel kriterler' gereğince herhangi bir bileşeni değiştirmesi tavsiye edilir.

Not:

*Bu ürün DEHP, DBP veya BBP gibi PVC veya fitalatlarla yapılmamıştır.

*Bu ürün doğal kauçuk lateks ile yapılmamıştır.

*Üretici, bu özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Saklama

Maskenin, uzun bir süre saklanmadan önce tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun. Maskeyi doğrudan güneş ışığından uzak kuru bir yerde saklayın.

Bertaraf Etme


Bu maske herhangi bir tehlikeli madde içermez ve normal ev çöplüğünüzle birlikte atılabilir.

Maskeyi hastalar arasında yeniden işleme


Hastalar arasında kullanırken bu maskeyi yeniden uygulayın. Temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon talimatları ResMed.com/downloads/mask adresinde mevcuttur. İnternet erişiminiz yoksa, lütfen ResMed temsilcinize başvurun.

Semboller

Ürününüzde veya ambalajınızda aşağıdaki semboller görünebilir:

	Nazal Kızak Maske		Cihaz Ayarı- Yastıklar
	Silikon Ebadı - Küçük		Silikon Ebadı - Orta
	Silikon Ebadı - Geniş		Silikon Ebadı - Küçük Geniş
	Standart Çerçeve		Küçük Çerçeve

 Dikkat, beraberindeki belgelere bakın

 Bir Uyarı veya İkazı belirtir ve olası bir yaralanma ile ilgili sizi uyarır veya cihazın güvenli ve etkili kullanımını için özel önlemleri açıklar.

ResMed.com/symbols adresindeki sembolere bakın.

Tüketici Garantisi

ResMed, 1999/44 / EC sayılı AB Direktifi ve Avrupa Birliğinde satılan ürünler için AB içindeki ilgili ulusal yasalar kapsamında verilen tüm tüketici haklarını kabul eder.



ResMed Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

MANUFACTURER

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirFit, AirSense, AirCurve and S9 are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip. © 2018 ResMed Ltd. 638139/2 2018-07

ResMed.com

CE 0123



638139